

Instrucciones de uso

Obtención de la muestra autocoleccionada

Instrucciones de autocolección de Copan FLOQSwabs® (552C.RM)

El FLOQSwabs® 552C.RM se debe utilizar para la colección de muestras vaginales para su uso con las pruebas cobas® 4800 para el VPH o cobas® para el VPH. Los usuarios deben leer y seguir atentamente las instrucciones. Si tiene alguna pregunta o dificultad con el proceso de colección que se describe a continuación, solicite más información a su proveedor de atención médica.

Si se producen eventos inesperados no descritos en estas instrucciones durante la autocolección de muestras, informe a su proveedor de atención médica.

Abra el hisopo justo antes de utilizarlo y tenga cuidado de no tocar ninguna superficie con la punta del hisopo.

ADVERTENCIAS:

Informe a su proveedor de atención médica si ha utilizado alguna sustancia, como cremas vaginales, geles, lubricantes, etc., en las 24 horas previas a la colección.

No utilizar en los siguientes casos:

- durante el embarazo o en los tres meses posteriores al parto;
- si recientemente se sometió a una cirugía ginecológica;
- en caso de sangrado inusual o dolor pélvico.

No se ha evaluado la colección de muestras durante el ciclo menstrual.

Durante los 3 días previos a la autocolección de una muestra vaginal, se debe evitar el uso de óvulos, cremas o lavados vaginales, anticonceptivos vaginales o preservativos.


Durante los 2 días anteriores a la autocolección de una muestra vaginal, se debe abstener de mantener relaciones sexuales y de realizarse ecografías o exámenes ginecológicos.



Lávese las manos con agua y jabón antes de empezar.




Gire y retire la tapa para sacar el hisopo del tubo.

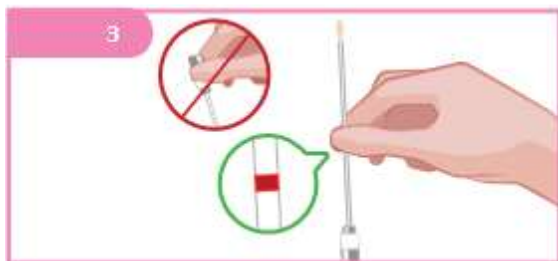

Sujete el hisopo en la marca roja.



Póngase en una posición cómoda y, con la mano libre, extienda la piel de la apertura vaginal mientras introduce con cuidado el hisopo hasta la marca roja.

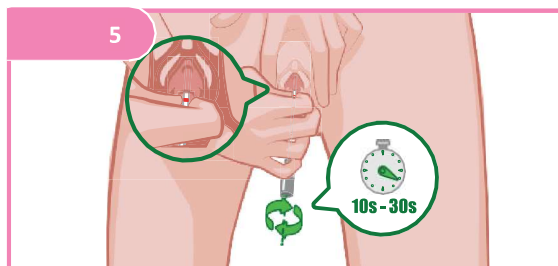

Gire suavemente el hisopo durante de 10 a 30 segundos.
s = SEGUNDOS



Vuelva a introducir el hisopo en el tubo hasta que escuche un CLIC. Después de la colección, entregue el hisopo para que se analice.